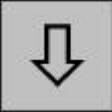



TIBAR Kurzanleitung: Prüfen einer FDA Sonde

SW 2.14 / 01.03.06

Zu drückende Tasten	Was mache ich	Was zeigt Display
Drucker einschalten!		
	Gerät einschalten	*** Tibar *** V 2.14 ? 12:02:05 ? 27-02-2006
 	Menü aussuchen	*** Tibar *** Test trocken? Test nass? ?
	Werte werden angezeigt, ausgedruckt und gespeichert	Test trocken S01 R Lampe: 105 Ohm Normal : 1.4 kOhm pruefen: 11.2 kOhm
	2 Sekunden gedrückt halten, Gerät schaltet aus.	Test trocken S01 R Lampe: 105 Ohm Normal : 1.4 kOhm pruefen: 11.2 kOhm
Drucker wieder ausschalten!		

TIBAR Kurzanleitung: Prüfen einer FDA Sonde

SW 2.14 / 01.03.06

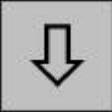Zu drückende Tasten	Was mache ich	Was zeigt Display
Drucker einschalten!		
	Gerät einschalten	*** Tibar *** V 2.14 ? 12:02:05 ? 27-02-2006
 	Menü aussuchen	*** Tibar *** Test trocken? Test nass? ?
	Werte werden angezeigt, ausgedruckt und gespeichert	Test trocken S01 R Lampe: 105 Ohm Normal : 1.4 kOhm pruefen: 11.2 kOhm
	2 Sekunden gedrückt halten, Gerät schaltet aus.	Test trocken S01 R Lampe: 105 Ohm Normal : 1.4 kOhm pruefen: 11.2 kOhm
Drucker wieder ausschalten!		